

Doplňující informace na obal respirátorů

Jedná se o filtrační masku proti částicím s filtrační účinností převyšující 97% (Osobní ochranný prostředek dle Nařízení (EU) 2016/425). Určeným účelem použití je ochrana uživatele před přímým přenosem částic z okolí směrem k uživateli. Respirátor dále slouží i k ochraně uživatele filtrací vdechovaného vzduchu s celkovou filtrační účinností převyšující 97%.



Čtete návod k použití

Před použitím zkontrolujte stav respirátoru, NEPOUŽÍVEJTE, pokud je poškozený (řezné poškození, chybějící upevnění)

1. Vezměte masku za gumíčky tak, aby nosní spona směřovala nahoru, jak je znázorněno na obrázku
2. Umístěte respirátor na obličej tak, aby zakrýval nos, ústa a bradu, jak je znázorněno na obrázku.
3. Umístěte gumíčky za uši, jak je znázorněno na obrázku.
4. Ohněte a utáhněte nosní sponu, aby respirátor dobře přilnul k pokožce a aby nedocházelo k únikům.
5. Zkontrolujte, zda je respirátor dobře upevněný a utěsněný následujícím způsobem: zakryjte masku oběma rukama a dýchejte. Pokud vzduch prochází bokem a kolem nosu, přiložte respirátor zpět na obličej a znovu utáhněte sponu na nos. Opakujte operaci, dokud nedosáhnete optimálního výsledku. Pokud respirátor nemůžete správně nosit, vyhněte se kontaminované oblasti.

Bezpečnostní opatření pro použití

1. Nedodržení všech pokynů může vážně snížit účinnost této masky a vést k nemoci, zranění nebo dokonce smrti. Pečlivé dodržování těchto pokynů je důležitým krokem k bezpečnému použití respirátoru.
2. Stejně jako u jiných dýchacích přístrojů musí být uživatel před použitím poučen formou návodu k použití.
3. Tento produkt nedodává kyslík. Masky by se neměly používat v prostředích, kde je procento kyslíku v atmosféře nižší než 17%.
4. Nepoužívejte, pokud máte pocit, že kontaminace prostředí může být zdraví a život ohrožující.
5. Nepoužívejte v přítomnosti výbušného nebo potenciálně výbušného prostředí.
6. Okamžitě opusťte kontaminovanou oblast a masku zlikvidujte a vyměňte, je-li maska poškozena nebo je-li obtížné dýchat.
7. Neměňte ani neupravujte konstrukci masky.
8. Nepoužívejte polomasku s vousy nebo jinými předměty, které zabraňují přímému kontaktu polomasky s obličejem a způsobují, že maska netěsní.
9. Tato maska s označením NR je pouze na jedno použití. Nelze opakovaně použít (vhodné pouze pro jednu nepřetržitou pracovní směnu – 8 hodin). Nevyžaduje údržbu. Po jednom použití masku zlikvidujte.
10. Doporučuje se skladovat v suchém, větraném, nekorozivním plynném prostředí mimo dosah slunečního záření nebo jiných zdrojů tepla (od -30°C do 50°C; relativní vlhkost < 80%)

Notifikovaná osoba: Universal Uygunluk Degerlendirme Hizmetleri ve Tic. A.Ş. (2163)

Tatlısu Mah. Arif Ay Sk. No:16-3 Umraniye-Istanbul /TURKEY