

Návod k použití a bezpečnostní opatření k respirátorům FFP2 NR

Jedná se o filtrační masku proti částicím s filtrační účinností převyšující 94% (Osobní ochranný prostředek dle Nařízení (EU) 2016/425). Určeným účelem použití je ochrana uživatele před přímým přenosem částic z okolí směrem k uživateli. Respirátor dále slouží i k ochraně uživatele filtrací vdechovaného vzduchu s celkovou filtrační účinností převyšující 94%.



Čtěte návod k použití

Před použitím zkontrolujte stav respirátoru, NEPOUŽÍVEJTE, pokud je poškozený (řezné poškození, chybějící upevnění)

1. Vezměte masku za gumičky tak, aby nosní spona směřovala nahoru, jak je znázorněno na obrázku
2. Umístěte respirátor na obličej tak, aby zakrýval nos, ústa a bradu, jak je znázorněno na obrázku.
3. Umístěte gumičky za uši, jak je znázorněno na obrázku.
4. Ohněte a utáhněte nosní sponu, aby respirátor dobře přilnul k pokožce a aby nedocházelo k únikům.
5. Zkontrolujte, zda je respirátor dobře upevněný a utěsněný následujícím způsobem: zakryjte masku oběma rukama a dýchejte. Pokud vzduch prochází bokem a kolem nosu, přiložte respirátor zpět na obličej a znovu utáhněte sponu na nos. Opakujte operaci, dokud nedosáhnete optimálního výsledku. Pokud respirátor nemůžete správně nosit, vyhněte se kontaminované oblasti.

Bezpečnostní opatření pro použití

1. Nedodržení všech pokynů může vážně snížit účinnost této masky a vést k nemoci. Pečlivé dodržování těchto pokynů je důležitým krokem k bezpečnému použití respirátoru.
2. Stejně jako u jiných dýchacích přístrojů musí být uživatel před použitím poučen formou návodu k použití.
3. Tento produkt nedodává kyslík. Masky by se neměly používat v prostředích, kde je procento kyslíku v atmosféře nižší než 17%.
4. Nepoužívejte, pokud máte pocit, že kontaminace prostředí může být zdraví a život ohrožující.
5. Nepoužívejte v přítomnosti výbušného nebo potenciálně výbušného prostředí.
6. Okamžitě opusťte kontaminovanou oblast a masku zlikvidujte a vyměňte, je-li maska poškozena nebo je-li obtížné dýchat.
7. Neměňte ani neupravujte konstrukci masky.
8. Nepoužívejte polomasku s vousy nebo jinými předměty, které zabraňují přímému kontaktu polomasky s obličejem a způsobují, že maska netěsní.
9. Tato maska s označením NR je pouze na jedno použití. Nelze opakovaně použít (vhodné pouze pro jednu nepřetržitou pracovní směnu – 8 hodin). Nevyžaduje údržbu. Po jednom použití masku zlikvidujte.
10. Polomasky udržujte stále zabalené při pokojové teplotě a mimo dosah slunečního záření nebo jiných zdrojů tepla.