

KONTROLNÍ KAMERA PRO UŠNÍ KANÁL

# Bezdrátový ušní otoskop s kamerou

## Návod k použití

Děkujeme za zakoupení výrobku. Před prvním použitím si pozorně přečtěte celý návod a uschovejte jej pro pozdější potřebu.

**DŮLEŽITÉ:** Děti smějí výrobek používat pouze pod dohledem dospělé osoby.  
Hlavní jednotku neponořujte do vody a k nabíjení používejte napětí nejvýše 5 V.

**FAJNSHOP.com**

# 1. Základní informace

Tento návod popisuje funkce a vlastnosti výrobku, postup uvedení do provozu, řešení běžných problémů a bezpečnostní opatření. Pro dosažení co nejlepších výsledků si před použitím přečtěte všechny pokyny.

# 2. Technické údaje

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Označení výrobku    | Wireless Visual Ear Pick            |
| Hmotnost            | 46 g                                |
| Síťový standard     | IEEE 802.11 b/g/n                   |
| Anténa              | Vestavěná anténa IPEX               |
| Pracovní frekvence  | 2,4 GHz                             |
| Přenos obrazu       | 30 snímků/s                         |
| Baterie             | 130 mAh                             |
| Provozní doba       | 40-45 minut                         |
| Doba nabíjení       | Přibližně 45 minut                  |
| Nabíjecí vstup      | 5 V / 0,2 A                         |
| Pracovní vzdálenost | 1,2-1,5 cm (údaj z tabulky výrobce) |
| Rozlišení obrazu    | 1920 x 1080 pixelů                  |
| Gyroskop            | 6osý                                |

# 3. Instalace aplikace

1. V obchodě Apple App Store nebo Google Play vyhledejte a nainstalujte aplikaci AIR-LOOK.  
Aplikaci lze stáhnout také pomocí QR kódu uvedeného v originálním návodu.
2. Zvolte verzi aplikace odpovídající operačnímu systému telefonu - iOS nebo Android.
3. Originální návod obsahuje také samostatné QR kódy k instruktážním videím pro iOS a Android.

## 4. Zapnutí a připojení

1. Stiskněte tlačítko napájení a podržte je přibližně 2 sekundy. Modrá kontrolka začne blikat - přístroj čeká na připojení.
2. V telefonu zapněte Bluetooth a Wi-Fi. V seznamu bezdrátových sítí vyhledejte název začínající na AIR-ES-\*\*\* a připojte se k němu.
3. Po úspěšném připojení začne modrá kontrolka svítit nepřerušovaně.
4. Spustíte aplikaci AIR-LOOK a klepněte na tlačítko Start. Zobrazí se obraz z kamery a přístroj je připraven k použití.

## 5. Důležitá upozornění a řešení potíží

|                                                 |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Chybí obraz, obraz zamrzá nebo je rušený</b> | Nejprve ověřte, že je telefon připojen k Wi-Fi síti přístroje. Poté případně restartujte přístroj nebo aplikaci AIR-LOOK. |
| <b>Přístroj se nezapne nebo kontrolka bliká</b> | Baterie může být vybitá. Přístroj nabijte a zkuste jej znovu zapnout.                                                     |
| <b>Nelze navázat spojení</b>                    | Otoskop může být připojen k jinému telefonu. Vypněte jej, znovu zapněte a opakujte připojení.                             |

### Význam stavové kontrolky

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| <b>Pomalé blikání</b>     | Přístroj čeká na připojení.     |
| <b>Trvalé svícení</b>     | Připojení k Wi-Fi bylo úspěšné. |
| <b>Rychlé blikání</b>     | Nízký stav baterie.             |
| <b>Svítí při nabíjení</b> | Probíhá nabíjení.               |
| <b>Po nabití zhasne</b>   | Baterie je plně nabitá.         |

## 6. Správné použití a zaostření

1. Zvukovod je zakřivený. Při používání proto polohu otoskopu upravujte pomalu a opatrně, aby byl obraz bubínku zřetelný.
2. Kamera má pevně nastavené zaostření. Podle textu návodu bývá nejostřejší obraz při vzdálenosti přibližně 1,5-2 cm od objektivu.
3. Podle potřeby měňte vzdálenost mezi kamerou a sledovaným místem, dokud nebude obraz ostrý. Přístrojem netlačte a neprovádějte prudké pohyby.

## 7. Bezpečnostní opatření

1. Před použitím zkontrolujte své bezprostřední okolí. Výrobek nepoužívejte na místě, kde se pohybují další osoby, aby nedošlo k náhodnému nárazu a poranění.
2. Děti nesmějí výrobek používat samostatně. Použití je možné pouze pod dohledem dospělé osoby.
3. Hlavní jednotku neponořujte do kapaliny. Vniknutí vody může zařízení poškodit.
4. Výrobek obsahuje vestavěný lithiový akumulátor. Pokud jej delší dobu nepoužíváte, nabijte jej alespoň jednou za měsíc.
5. Během provozu se může teplota výrobku mírně zvýšit, nejvýše přibližně na 45 °C. Podle originálního návodu jde o běžný provozní stav.
6. Výrobek nenabíjejte nabíječkou ani powerbankou s výstupním napětím vyšším než 5 V.

**Pokud při používání pocítíte bolest nebo nepohodlí, použití ihned ukončete.**