

KONTROLNÁ KAMERA PRE ZVUKOVOD

Bezdrôtový ušný otoskop s kamerou

Návod na použitie

Ďakujeme za zakúpenie výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte celý návod a uschovajte ho na neskoršie použitie.

DÔLEŽITÉ: Deti smú výrobok používať iba pod dohľadom dospelaj osoby. Hlavnú jednotku neponárajte do vody a na nabíjanie používajte napätie najviac 5 V.

FAJNSHOP.com

1. Základné informácie

Tento návod opisuje funkcie a vlastnosti výrobku, postup uvedenia do prevádzky, riešenie bežných problémov a bezpečnostné opatrenia. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov si pred použitím prečítajte všetky pokyny.

2. Technické údaje

Označenie výrobku	Wireless Visual Ear Pick
Hmotnosť	46 g
Sieťový štandard	IEEE 802.11 b/g/n
Anténa	Vstavaná anténa IPEX
Pracovná frekvencia	2,4 GHz
Prenos obrazu	30 snímok/s
Batéria	130 mAh
Prevádzkový čas	40-45 minút
Čas nabíjania	Približne 45 minút
Nabíjací vstup	5 V / 0,2 A
Pracovná vzdialenosť	1,2-1,5 cm (údaj z tabuľky výrobcu)
Rozlíšenie obrazu	1920 x 1080 pixelov
Gyroskop	6-osový

3. Inštalácia aplikácie

1. V obchode Apple App Store alebo Google Play vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu AIR-LOOK. Aplikáciu možno stiahnuť aj pomocou QR kódu uvedeného v originálnom návode.
2. Zvoľte verziu aplikácie zodpovedajúcu operačnému systému telefónu - iOS alebo Android.
3. Originálny návod obsahuje aj samostatné QR kódy k inštruktážnym videám pre iOS a Android.

4. Zapnutie a pripojenie

1. Stlačte tlačidlo napájania a podržte ho približne 2 sekundy. Modrá kontrolka začne blikať - prístroj čaká na pripojenie.
2. V telefóne zapnite Bluetooth a Wi-Fi. V zozname bezdrôtových sietí vyhľadajte názov začínajúci na AIR-ES-*** a pripojte sa k nemu.
3. Po úspešnom pripojení začne modrá kontrolka svietiť nepretržite.
4. Spustíte aplikáciu AIR-LOOK a ťuknite na tlačidlo Start. Zobrazí sa obraz z kamery a prístroj je pripravený na použitie.

5. Dôležité upozornenia a riešenie problémov

Chýba obraz, obraz zamrzá alebo je rušený	Najskôr overte, že je telefón pripojený k Wi-Fi sieti prístroja. Potom prípadne reštartujte prístroj alebo aplikáciu AIR-LOOK.
Prístroj sa nezapne alebo kontrolka bliká	Batéria môže byť vybitá. Prístroj nabite a skúste ho znova zapnúť.
Nemožno vytvoriť spojenie	Otoskop môže byť pripojený k inému telefónu. Vypnite ho, znova zapnite a zopakujte pripojenie.

Význam stavovej kontrolky

Pomalé blikanie	Prístroj čaká na pripojenie.
Trvalé svietenie	Pripojenie k Wi-Fi bolo úspešné.
Rýchle blikanie	Nízky stav batérie.
Svieti pri nabíjaní	Prebieha nabíjanie.
Po nabití zhasne	Batéria je úplne nabitá.

6. Správne použitie a zaostrenie

1. Zvukovod je zakrivený. Pri používaní preto polohu otoskopu upravujte pomaly a opatrne, aby bol obraz bubienka zreteľný.
2. Kamera má pevne nastavené zaostrenie. Podľa textu návodu býva najostrejší obraz pri vzdialenosti približne 1,5-2 cm od objektívu.
3. Podľa potreby meňte vzdialenosť medzi kamerou a sledovaným miestom, kým nebude obraz ostrý. Prístrojom netlačte a nevykonávajte prudké pohyby.

7. Bezpečnostné opatrenia

1. Pred použitím skontrolujte svoje bezprostredné okolie. Výrobok nepoužívajte na mieste, kde sa pohybujú ďalšie osoby, aby nedošlo k náhodnému nárazu a poraneniu.
2. Deti nesmú výrobok používať samostatne. Použitie je možné iba pod dohľadom dospeléj osoby.
3. Hlavnú jednotku neponárajte do kvapaliny. Vniknutie vody môže zariadenie poškodiť.
4. Výrobok obsahuje vstavaný lítiový akumulátor. Ak ho dlhší čas nepoužívate, nabite ho aspoň raz za mesiac.
5. Počas prevádzky sa môže teplota výrobku mierne zvýšiť, najviac približne na 45 °C. Podľa originálneho návodu ide o bežný prevádzkový stav.
6. Výrobok nenabíjajte nabíjačkou ani powerbankou s výstupným napätím vyšším ako 5 V.

Ak pri používaní pocítite bolesť alebo nepohodlie, používanie ihneď ukončite.